

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Sáp cầm máu xương
Bone Wax và Bone Wax Stick

Mô tả

Bone Wax là một loại chất cầm máu cơ học dùng để ngăn chặn tình trạng chảy máu ở xương. Bone Wax là một hỗn hợp vô trùng, không bị hấp thụ có nguồn gốc từ sáp ong (70%) và Vaseline (30%).

Bone Wax có hai dạng khác nhau, dạng **miếng** cổ điển (mã sản phẩm 1029754) có thể nặn và nhào khi “tay ấm”, và dạng **thỏi** (mã sản phẩm 1029755).

Chỉ định

Cầm máu ở xương:

- Trong chấn thương chỉnh hình
- Trong phẫu thuật lồng ngực (xương ức và xương sườn)
- Trong phẫu thuật nha khoa, răng miệng và hàm
- Trong phẫu thuật thần kinh (khoan xương)

Cách sử dụng

Đối với dạng miếng:

Đầu tiên cần dùng tay nhào trộn để làm mềm Bone Wax rồi sau đó dùng que spatula phết chất này lên xương để cầm máu ở xương.

Đối với dạng thỏi:

Cần thoa Bone Wax Stick nhiều lần lên bề mặt xương hoặc dùng dao cạo sáp rồi sau đó sử dụng que spatula phết lên xương.

Chỉ nên sử dụng lượng tối thiểu phù hợp, vì nếu không có thể gây tác động xấu đến quá trình tái tạo xương. Bone Wax vẫn còn tồn tại trong cơ thể.

Cơ chế hoạt động

Bone Wax không có bất kỳ đặc tính dược lý nội tại nào. Hiệu quả cầm máu cơ học được tạo ra do sự bít tắc các mạch máu trong xương.

Chống chỉ định

- Không sử dụng Bone Wax ở những vùng mô bị viêm nhiễm, do Bone Wax có thể làm gia tăng tình trạng nhiễm trùng.
- Không bôi Bone Wax trực tiếp lên hệ thần kinh trung ương.
- Không sử dụng Bone Wax ở các bệnh nhân dị ứng với sáp ong.

Cảnh báo

Không tái sử dụng sản phẩm: Nguy cơ nhiễm trùng cho bệnh nhân và/hoặc người sử dụng đồng thời suy giảm hiệu quả của sản phẩm do tái sử dụng. Nguy cơ chấn thương, bị bệnh hoặc tử vong do nhiễm bẩn và/hoặc suy giảm chức năng của sản phẩm.

Cần sử dụng Bone Wax ngay sau khi mở bao bì. Chỉ sử dụng khi bao bì còn nguyên vẹn.

Tác dụng phụ

Có thể xảy ra phản ứng với dị vật, viêm và u hạt khi sử dụng Bone Wax. Có thể xảy ra tụ máu và huyết thanh sau khi sử dụng Bone Wax.

Tuổi thọ và điều kiện bảo quản

- Không được sử dụng Bone Wax khi đã hết hạn.
- Cần bảo quản Bone Wax trong điều kiện nhiệt độ 20 ± 5 °C và không được tái khử trùng.

Tiệt trùng

Bone Wax được tiệt trùng bằng tia gamma

Đóng gói

Bone Wax:

Trọng lượng: 2,55 g

Bone Waxstick:

Trọng lượng: 3,15 g

Các biểu tượng được sử dụng trên nhãn mác



Không được tái sử dụng



Hạn dùng (năm, tháng, ngày)



Giới hạn nhiệt độ bảo quản



Sản phẩm đã được vô trùng trừ khi bao bì đã bị mở hoặc hư hỏng.
Phương pháp khử trùng: Chiếu tia Gamma



Chứng nhận Ce-mark và mã nhận dạng của tổ chức chứng nhận. Sản phẩm phù hợp với các yêu cầu thiết yếu của Chỉ thị thiết bị y tế 93/42/EEC.



Số lô



Xem hướng dẫn sử dụng



Mã sản phẩm

Ngày thông tin

11/2015