

# CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên sản phẩm: **Keo dán chống rò rỉ Superfiller**

Chủng loại: **Superfiller**

Mã sản phẩm: **F05008**

### Mô tả sản phẩm

Superfiller là một loại keo tạo hàng rào bảo vệ da an toàn và hiệu quả, sử dụng cho lỗ mở thông ra da như lỗ mở đại tràng, lỗ mở hồi tràng, lỗ mở dạ dày và lỗ mở đường tiết niệu.

### Mục đích sử dụng

Superfiller được sử dụng để lấp đầy những nếp gấp da, tổn thương, hay các bất thường khác của da.

### Thận trọng

Chỉ sử dụng bên ngoài, không sử dụng cho vết cắt hay vết thương hở. Có chứa cồn. Có thể gây rát nhẹ khi sử dụng. Nếu có kích ứng da xảy ra, liên hệ với bác sĩ hay các chuyên gia về y tế khác.

### Phương pháp ứng dụng

Keo superfiller có thể sử dụng cho vùng da ẩm ướt xung quanh lỗ mở ra da, lấp đầy những nếp gấp da, tổn thương, hay các bất thường khác của da. Lấy một lượng vừa đủ để phủ lên bề mặt da bị ảnh hưởng, làm ướt ngón tay và thoa đều lượng keo ra trên bề mặt da để superfiller thấm xuống.

### Phương pháp loại bỏ

Keo được loại bỏ dễ dàng sau 48 giờ sử dụng, nếu cần loại bỏ trước 48 giờ có thể sử dụng nước ấm để gỡ bỏ. Không cần loại bỏ hoàn toàn lớp keo khỏi da trước khi sử dụng thêm lần tiếp theo. Lượng keo còn dư lại có thể để tránh kích ứng da, sử dụng lớp keo mới bôi lên trên lớp dư lượng này. Sau khi sử dụng, đóng nắp ống an toàn.

**Bảo quản:** Nơi mát và khô, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp.