

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Dây dẫn chụp mạch vành

Chủng loại: Angiodyn G wire

Mô tả sản phẩm

Dây dẫn đường Angiodyn dùng để luồn, cố định và định vị ống thông chụp cản quang mạch máu.

Các độ dài khác nhau: 150 – 260 cm

Bọc PTFE

Nhiều loại đầu khác nhau

Chỉ định

Sản phẩm dùng trong can thiệp để chụp cản quang mạch máu. Dây dẫn đường Angiodyn được dùng để tiếp cận mạch máu dưới da chủ yếu trong thủ thuật Seldinger tạo điều kiện cho việc đưa ống thông chụp cản quang mạch máu ngay sau đó.

Chống chỉ định

Người được xác định dị ứng nghiêm trọng hoặc không dung nạp với các vật liệu được sử dụng trong sản phẩm.

Nguy cơ

Các biến chứng có thể xảy ra bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở:

- Thuyên tắc khí
- Tụ máu tại vị trí chọc
- Nhiễm trùng
- Thủng thành mạch máu

Thận trọng

Trước khi can thiệp, mọi thiết bị được sử dụng cho quá trình cần được kiểm tra để đảm bảo khả năng hoạt động tốt. Tránh việc kéo dây dẫn ra qua kim bằng kim loại. Độ sắc của kim có thể làm hỏng lớp bọc PTFE hoặc làm đứt dây dẫn. Nếu gặp trở ngại lớn trong quá trình thao tác, vui lòng ngừng thao tác và xác định nguyên nhân trở ngại trước khi tiếp tục. Trường hợp không thể xác định được nguyên nhân trở ngại thì thu ống thông và dây dẫn về.

Hướng dẫn sử dụng

- Dây dẫn được cung cấp trong bao bì vô trùng. Kiểm tra bao bì. Không dùng dây dẫn nếu phát hiện dấu hiệu chứng tỏ bao bì bị thủng hoặc sản phẩm bị hỏng. Khi sử dụng với các thiết bị y tế khác, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng của thiết bị y tế đó.
- Lấy dây dẫn ra khỏi bao. Trước khi sử dụng, bắt buộc phải kiểm tra kỹ mọi bộ phận của thiết bị.
- Mở đường vào mạch máu.
- Luồn đầu mềm của dây dẫn vào kim chọc.
- Đưa dây dẫn qua kim vào mạch máu và định vị dây dẫn.
- Cố định dây dẫn tại vị trí cần thiết và thu kim về.
- Đưa ống thông vào theo dây dẫn.
- Cẩn thận thu dây dẫn ra khỏi ống thông.

Hướng dẫn hủy bỏ

Sau khi sử dụng, hủy bỏ sản phẩm và bao bì theo chính sách của bệnh viện, cơ quan quản lý hay chính quyền địa phương.