

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Bơm tiêm dầu xoáy trog

Mô tả sản phẩm

Bơm tiêm dùng một lần.

Thiết bị bao gồm một xi lanh có thang đo và một pit tông để hút hoặc đẩy một lượng chất lỏng cụ thể thông qua một kim rỗng.

Đầu bơm tiêm có rãnh xoáy để gắn vào dụng cụ được yêu cầu tránh bị tuột trong quá trình bơm thuốc/dịch bằng áp lực cao trong thủ thuật can thiệp tim mạch

Chỉ định

Bơm tiêm dùng một lần dùng để hút và tiêm dịch.

Chống chỉ định

Chưa biết đến

Hướng dẫn sử dụng

Kéo pit tông lên về phía cán bơm tiêm. Kéo đến vạch chỉ lượng thuốc cần hút vào.

Tháo nắp kim ra. Cần thận tránh chạm vào kim.

Đưa kim vào trong lọ dung dịch theo hướng thẳng đứng

Đẩy pit tông để đẩy hết khí trong bơm tiêm ra ngoài. Đốc ngược lọ dung dịch để đẩy lọ hướng lên trên. Cần thận tránh để kim rời khỏi lọ. Giữ cổ lọ thuốc bằng ngón cái và ngón trỏ của tay không thuận. Cầm bơm tiêm bằng tay còn lại. Không để kim bị cong.

Kéo pit tông. Dùng tay thuận kéo pit tông đến vạch trên thân bơm tiêm chỉ lượng dung

dịch cần lấy. Kiểm tra dung dịch trong bơm tiêm xem có bọt khí không. Vỗ nhẹ vào

thân bơm tiêm để bọt khí trong dung dịch nổi lên về phía kim. Nhấn nhẹ pit tông. Khi

bọt khí nổi lên đầu bơm tiêm thì nhấn pit tông cho đến khi bọt khí thoát hết ra ngoài.

Một lượng thuốc nhỏ có thể thoát theo ra khi loại bỏ bọt khí. Sau khi loại bỏ bọt khí, cần kiểm tra lại lượng dung dịch cần lấy. Lấy kim khỏi lọ và đậy nắp an toàn.

Sau khi lấy đủ lượng thuốc/dịch cần thiết gắn bơm tiêm vào các thiết bị khác theo yêu cầu của thủ thuật bằng rãnh xoáy ở đầu bơm tiêm.

Nguy cơ

Chưa biết đến

Thận trọng

Trước khi sử dụng, cần kiểm tra để đảm bảo bao bì chưa bị mở và đảm bảo bơm tiêm hoạt động tốt. Không sử dụng thiết bị hỏng. Việc sử dụng thiết bị cần được thực hiện bởi nhân viên có trình độ, đã được đào tạo bài bản trong việc áp dụng các kỹ thuật an toàn và cách xử lý các biến chứng có thể xảy ra (như tổn thương do mũi kim).

Đảm bảo việc gắn với các thiết bị khác ở đầu rãnh xoáy của bơm tiêm phải chặt, tránh bị tuột trong quá trình bơm dưới áp lực cao

Hướng dẫn hủy bỏ

Sau khi sử dụng, hủy bỏ sản phẩm và bao bì theo chính sách của bệnh viện, cơ quan quản lý hay chính quyền địa phương.