

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Kim luôn động mạch
Chủng loại: Arteriofix

Mô tả sản phẩm

Kim luôn động mạch Arteriofix

Kim luôn động mạch dùng trong quá trình theo dõi huyết áp xâm lấn và lấy mẫu máu bằng thủ thuật Seldinger.

Chỉ định

Kim luôn động mạch loại Arteriofix Seldinger dùng cho việc đặt cannula động mạch để theo dõi huyết áp xâm lấn và lấy mẫu máu xét nghiệm.

Chống chỉ định

Hiện chưa có thông tin

Nguy cơ

Việc chọc sai hoặc làm tổn thương da hay mạch máu có thể dẫn đến chảy máu mô đích hoặc các cơ quan gần đó. Có thể gây thủng, rách mạch máu trong quá trình đưa ống thông vào. Cần phát hiện kịp thời nếu có huyết khối vì có thể gây thuyên tắc mạch.

Thận trọng

Trước khi sử dụng, cần kiểm tra kim chọc của kim luôn động mạch để phát hiện hỏng hóc và đảm bảo bao bì chưa bị mở. Không sử dụng thiết bị hỏng. Việc đặt kim chọc cần được thực hiện bởi nhân viên có trình độ, đã được đào tạo bài bản trong việc áp dụng các kỹ thuật an toàn và cách xử lý các biến chứng có thể xảy ra (như tổn thương do mũi kim).

Kỹ thuật sử dụng

Kim luôn động mạch Arteriofix được đặt bằng thủ thuật Seldinger dùng cho động mạch hoặc tĩnh mạch. Chọc mạch bằng một kim rỗng, sắc, có hoặc không có que nong. Rút que nong ra và đưa dây dẫn vào và đưa bộ mở đường vào theo dây dẫn. Rút kim ra và đưa ống thông vào theo dây dẫn. Sau đó thu dây dẫn về và sử dụng hệ thống theo dõi.

Hướng dẫn hủy bỏ

Sau khi sử dụng, hủy bỏ sản phẩm và bao bì theo chính sách của bệnh viện, cơ quan quản lý hay chính quyền địa phương.