


Aesculap®

Phẫu thuật thần kinh Aesculap

Hướng dẫn sử dụng
Kẹp cầm máu da đầu RANEY FF015P

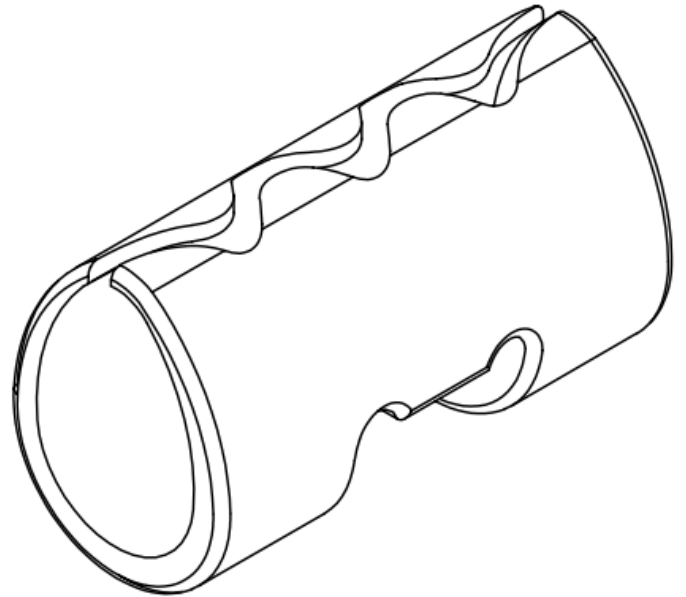

Aesculap AG | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen | Đức
ĐT +49 (0) 7461 95-0 | Fax +49 (0) 7461 95-26 00 | www.aesculap.com

Aesculap – một công ty của B. Braun

TA-Nr. 009741

06/12

V6

Änd.-Nr. 44941







Thay đổi kỹ thuật dành riêng



Aesculap®
Kẹp cầm máu da đầu RANEY FF015P

Biểu tượng trên sản phẩm và bao bì

	Tiệt khuẩn bằng ethylen oxid
	Không tái sử dụng khi áp dụng theo quy định của nhà sản xuất
	Hạn dùng
	Thận trọng, biểu tượng cảnh báo chung Thận trọng, xem tài liệu đi kèm với sản phẩm

Có thể áp dụng với

- ▶ Để biết hướng dẫn cụ thể về mục sử dụng và thông tin về khả năng tương thích vật liệu, xem thêm Phần Aesculap Extranet tại www.extranet.bbraun.com

Mục đích sử dụng

Kẹp cầm máu da đầu được sử dụng để cầm máu tạm thời cho phần tụ máu trên da đầu khi khoan sọ. Kẹp cầm máu da đầu được sử dụng trên các cạnh của vết thương trên da đầu với mục đích này.

Kích thước có sẵn

- Một hộp chứa 20 túi, một túi chứa 10 kẹp

Chỉ định

Xem mục đích sử dụng.

Xử lý và chuẩn bị an toàn

THẬN TRỌNG

Luật liên bang hạn chế thiết bị này được bán, hoặc theo lệnh của bác sĩ!



Nguy cơ nhiễm trùng cho bệnh nhân và/hoặc người dùng và suy giảm chức năng sản phẩm do tái sử dụng. Rủi ro thương tích, bệnh tật hoặc tử vong do nhiễm bẩn và/hoặc suy giảm chức năng của sản phẩm!
▶ Không tái xử lý sản phẩm.

Sản phẩm được tiệt khuẩn EO và đóng gói vô khuẩn.

Sản phẩm không được tái sử dụng.

- ▶ Đảm bảo rằng sản phẩm và các phụ kiện của nó chỉ được vận hành và sử dụng bởi những người có đào tạo, kiến thức hoặc kinh nghiệm cần thiết.
- ▶ Đọc, làm theo và giữ hướng dẫn sử dụng.
- ▶ Chỉ sử dụng sản phẩm phù hợp với mục đích sử dụng, xem Mục đích sử dụng.
- ▶ Không sử dụng các sản phẩm từ bao bì vô khuẩn mở hoặc bị hư hỏng.
- ▶ Trước mỗi lần sử dụng, kiểm tra sản phẩm xem có bị lỏng, cong, gãy, nứt hoặc gãy không.
- ▶ Không sử dụng sản phẩm nếu sản phẩm bị hỏng hoặc bị lỗi. Đặt sản phẩm sang một bên nếu nó bị hỏng.
- ▶ Không sử dụng sản phẩm đã hết hạn.
- ▶ Không tái tiệt khuẩn sản phẩm.

Vận hành an toàn



Nguy cơ chấn thương khi sử dụng sản phẩm ngoài tầm nhìn!
▶ Chỉ áp dụng sản phẩm dưới sự kiểm soát trực quan.

Lưu ý

Chỉ sử dụng kẹp cầm máu da đầu kết hợp với dụng cụ Aesculap/kẹp tháo FF003R.

Quy trình tái xử lý hợp lệ

Sản phẩm sử dụng một lần



Nguy cơ nhiễm trùng cho bệnh nhân và/hoặc người dùng và suy giảm chức năng sản phẩm do tái sử dụng. Rủi ro thương tích, bệnh tật hoặc tử vong do nhiễm bẩn và/hoặc suy giảm chức năng của sản phẩm!
▶ Không tái xử lý sản phẩm.

Bảo quản

- ▶ Bảo quản các sản phẩm sử dụng một lần được đóng gói vô khuẩn, bảo vệ chống bụi trong phòng khô, tối và kiểm soát nhiệt độ.

Dịch vụ kỹ thuật



Nguy cơ chấn thương và/hoặc trục trặc!
▶ Không sửa đổi sản phẩm.

- ▶ Để được bảo dưỡng và sửa chữa, vui lòng liên hệ với cơ quan B. Braun/Aesculap tại quốc gia của quý vị.

Việc sửa đổi trên thiết bị kỹ thuật y tế có thể dẫn đến mất quyền bảo đảm/bảo hành và mất giấy phép áp dụng.

Địa chỉ dịch vụ

Aesculap Technischer Service

Am Aesculap-Platz

78532 Tuttlingen / Đức

Điện thoại: +49 (7461) 95 -1602

Fax: +49 (7461) 16 -5621

E-Mail: ats@aesculap.de

Hoặc ở Mỹ:

Người nhận: Dịch vụ kỹ thuật Aesculap

615 Lambert Pointe Drive

Hazelwood

MO, 63042

Đường dây nóng Sửa chữa của Aesculap

Điện thoại: +1 (800) 214 -3392

Fax: +1 (314) 895 -4420

Các địa chỉ bảo dưỡng khác có thể được lấy từ địa chỉ nêu trên.

Thải bỏ

- ▶ Tuân thủ các quy định quốc gia khi thải bỏ hoặc tái chế sản phẩm, các thành phần và bao bì của sản phẩm!

Nhà phân phối tại Hoa Kỳ/Liên hệ tại Canada để biết thông tin và khiếu nại về sản phẩm

3773 Corporate Parkway

Center Valley, PA, 18034,

Hoa Kỳ

TA-Nr. 009741

06/12

V6

Änd.-Nr. 44941