

# CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên sản phẩm: **Bột gel hóa dịch lỏng dùng cho lỗ mở thông ra da Ileo Gel+**  
Chủng loại: **Ileo Gel+**  
Mã sản phẩm: **005012A**

### CHỈ ĐỊNH

ILEO GEL+ là chất làm cô đặc giúp rắn hóa chất thải dạng lỏng từ lỗ mở thông ra da.

### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

#### Các đặc tính

Vật dụng dành cho lỗ mở thông ra da, chất làm đông giúp chất thải trở nên rắn hơn bằng cách giữ cho cấu trúc cô đặc lại, điều này giúp việc làm sạch túi trở nên dễ dàng hơn. Chất thải lỏng bị gel hóa cũng giúp cho bộ lọc hoạt động hiệu quả và kéo dài hơn.

#### Hướng dẫn sử dụng

Lau khô tay trước khi sử dụng. Cho một gói vào trong túi.

Đối với túi 2 mảnh:

- Trước khi lắp túi, cho 1 gói thông qua miệng túi.
- Sau khi xả túi, cho thêm 1 gói vào trong túi thông qua miệng xả. Cần thận tránh làm vỡ gói.

Đối với túi 1 mảnh:

- Cho 1 gói thông qua miệng xả, cần thận tránh làm vỡ gói thuốc.

Khi túi đầy, xả túi bằng cách đổ chất thải vào trong bồn cầu.

#### Lưu ý:

- Nếu gặp khó khăn khi cho gói thuốc vào túi, hãy ngâm nước từ 3 đến 5 giây. Gói thuốc sẽ trở nên trơn hơn và dễ dàng cho vào túi hơn.
- Một gói đủ làm hóa rắn lượng chất thải trong 1 túi chứa. Tuy nhiên, tùy thuộc vào lượng chất thải mà có thể cân nhắc có nên dùng tiếp gói thứ hai hay không.
- Đừng sử dụng quá 2 viên cùng lúc vì sẽ làm rắn hóa chất thải quá nhiều và gây tắc nghẽn khi đang xả túi.

### CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không có bất kỳ chống chỉ định chính thức nào đối với ILEO GEL+. Là dụng cụ chỉ được dùng một lần, ILEO GEL+ không được tái sử dụng.

### CẢNH BÁO/THẬN TRỌNG

**Cảnh báo:** việc tái sử dụng dụng cụ chỉ dùng một lần có thể gây rủi ro tiềm ẩn đối với bệnh nhân. Điều này sẽ gây nguy cơ nhiễm bẩn hoặc giảm tác dụng của dụng cụ.

#### Thận trọng:

- Không được ăn
- Giữ xa tầm tay trẻ em
- Tránh nơi ẩm ướt
- Giữ nhiệt độ bảo quản theo như chỉ dẫn được in trên hộp sau khi tháo bỏ bao bì
- Không sử dụng sản phẩm hết hạn